

Návod k použití vakuové pumpy RX7

Základní informace

- **Typ produktu:** vakuová pumpa
- **Model:** RX7
- **Materiál:** ABS plast a silikon
- **Barva:** průhledná
- **Rozměry:** vkládací délka 24 cm, průměr 6 cm

Použití

1. **Příprava:**
Ujistěte se, že je pumpa čistá. Pokud je to poprvé, omyjte ji teplou vodou a mýdlem.
2. **Aplikace:**
Namažte okraje pumpy i penis lubrikačním gelem, aby se zajistilo těsnění a pohodlí.
3. **Vložení:**
Vložte penis do průhledného válce pumpy.
4. **Vakuum:**
Pomalu začněte vytvářet podtlak pomocí pumpovacího mechanismu. Tento proces zlepší prokrvení a zajistí erekci.
5. **Doba použití:**
Používejte pumpu po dobu 10-15 minut, podle potřeby. Nepřekračujte tuto dobu, aby nedošlo k přetížení tkání.
6. **Po použití:**
Po ukončení snížíte podtlak pomocí uvolňovacího ventilu. Pumpu omyjte teplou vodou a mýdlem a nechte vyschnout.

Výhody pravidelného použití

- Zlepšení schopnosti udržet erekci.
- Postupné zvětšení a zpevnění penisu.
- Možnost oddálení ejakulace.
- Podpora rekonvalescence po operaci prostaty.

Upozornění

- Produkt používejte pouze dle návodu.
- V případě bolesti nebo nepříjemného pocitu okamžitě přestaňte pumpu používat.
- Pokud trpíte zdravotními problémy, poradte se před použitím s lékařem.

Užijte si kvalitnější a dlouhotrvající sexuální zážitky s vakuovou pumpou RX7.